

# Materiais de impressão dima® Print

## Tempos de limpeza e pós-cura

Material	Indicação	Cor	Tempo de limpeza em álcool isopropílico (cara® Print Clean)	Tempo de pós-cura (HiLite® Power 3D)
 dima® Print Cast ruby	Estruturas calcináveis para infra-estrutura metálica de PPR, coroas e próteses fixas (até 5 elementos) e cerâmica prensada 3 minutos (1,5 minutos na frente + 1,5 minutos lado oposto)	Vermelha	Limpeza inicial: 1 minuto. Limpeza final: 1 minuto.	3 minutos (1,5 minutos na frente + 1,5 minutos no lado oposto)
 dima® Print Stone beige	Modelos	Gesso Bege	Limpeza inicial: 3 minutos. Limpeza final: 2 minutos.	10 minutos (5 minutos na frente + 5 minutos no lado oposto)
 dima® Print Stone teal	Modelos ortodônticos	Turquesa		
 dima® Print Gingiva Mask	Gengiva artificial para molelos	Rosa		
 dima® Print Ortho	Ferulizações/ Placas oclusais	Azul claro transparente		
 dima® Print Guide	Guia cirúrgico	Laranja claro transparente		

### Kulzer Brasil

R. Cenzo Sbrighi, 27 – Sala 42  
 São Paulo – SP – CEP 05036-010  
 São Paulo: (11) 3665-0500  
 Demais localidades: 0800-580-0829  
 sac@kulzer-dental.com

Saúde bucal nas melhores mãos.



**KULZER**  
 MITSUI CHEMICALS GROUP