


Parâmetros de configuração

cara® CAD para cara® Print 4.0

Informação importante:

- Observe as instruções de uso do material.
- Os parâmetros de configuração listados abaixo são para resinas dima® Print para uso com a cara® Print 4.0
- As dimensões fornecidas servem como diretrizes e podem ser personalizadas de acordo com os desejos individuais.

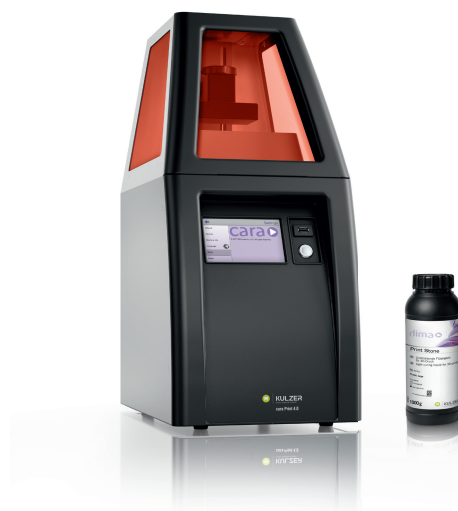

Opções de configuração de software (todos os números em mm):

Como em 06.2019



dima® Print Stone bege

CRIAÇÃO DE MODELO	Altura do modelo	Expansão do modelo				
	5.000 mm	0.200 mm				
CRIAÇÃO DE TROQUEL	Inclinação do perfil do troquel	Altura do perfil cônico do troquel	Altura da canaleta marginal	Profundidade da canaleta marginal	Diâmetro do pino	Ângulo do chanfro
	4.000°	8.000 mm	1.00 mm	0.000 mm	3.000 mm	10.0°
REFINAMENTO DO MODELO	Expansão marginal	Diâmetro do pino anti rotação	Pino inferior Anéis vestibulares			
	0.070 mm	0	Sim			
EXPORTAR						
Criar orifícios de drenagem	Espessura mínima					
	3.00 mm					
Orifícios de drenagem inferior	Diâmetro	Distância				
	2.00 mm	2.50 mm				
Orifícios de drenagem laterais	Número	Diâmetro	Deslocamento			
	10	3.00 mm	1.75 mm			

Saúde bucal nas melhores mãos.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP