

Charisma® Diamond

Fechamento de diastema com redistribuição de espaço utilizando Charisma® Diamond.

- André Minto • Taís Aparecida do Nascimento • Letícia Aparecida Pereira

Saúde bucal nas melhores mãos.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Fechamento de diastema com redistribuição de espaço utilizando Charisma® Diamond

Resumo:

O crescimento do apelo estético nos últimos tempos transformou a rotina dos cirurgiões-dentistas, pois os pacientes cada vez mais exigem uma solução rápida e de alta qualidade aos seus problemas.

Em vista deste fato e somado à introdução no mercado de materiais restauradores diretos de qualidade superior, tanto esteticamente quanto em resistência e durabilidade, as facetas diretas de resina composta tornaram-se uma opção válida que proporciona resultados extremamente satisfatórios em período de tempo mais curto quando comparado a outros procedimentos indiretos.

Contudo, o uso destes materiais diretos implica ao cirurgião-dentista o domínio de conceitos de proporcionalidade e dimensionamento, além de técnicas de escultura mais refinadas.

Entretanto, em alguns casos isso não é o suficiente, exigindo que o cirurgião-dentista se adeque a cada caso, fazendo uso de saídas criativas na tentativa de obter o melhor resultado possível. Dentre as opções existentes, o uso de anéis ortodônticos interproximais para melhorar a distribuição dos espaços disponíveis consiste em um artifício interessante a ser usado, tornando casos aparentemente impossíveis de serem resolvidos sem a associação com a ortodontia corretiva.

Ademais, diante de inúmeras situações clínicas onde há necessidade de reanatomização dental, por causas diversas como: diastemas, incisivos conóides, mau posicionamento, inclinações, fraturas, entre outros, é de vital importância o restabelecimento da correta relação comprimento-largura, proporção e correto posicionamento da linha média superior, sendo estes princípios, preponderantes na harmonização do sorriso.

Portanto, o presente caso clínico tem por finalidade demonstrar como o emprego de movimentações dentais prévias ao tratamento restaurador através da aplicação de anéis ortodônticos interproximais, influenciam no resultado estético final. A utilização da resina composta Charisma® Diamond (Kulzer) viabilizou a correta reprodução estética, onde destacamos a facilidade de manipulação e a perfeita interação óptica do material com as estruturas dentais.

Material Utilizado:

- Charisma® Diamond

Autores:

- André Minto

<http://www.ident.com.br/dr.andreminto>

- Taís Aparecida do Nascimento

Especialista em Dentística Restauradora

- Letícia Aparecida Pereira

Graduanda de Odontologia da Universidade de Franca

Fechamento de diastema com redistribuição de espaço utilizando Charisma® Diamond

Fotos do caso:



Figura 01 - Paciente do sexo feminino, jovem e com a presença de grande diastema entre os elementos 11 e 21. Vista frontal do sorriso.



Figura 02 - Vista frontal da paciente em oclusão e com lábios e bochechas afastadas.

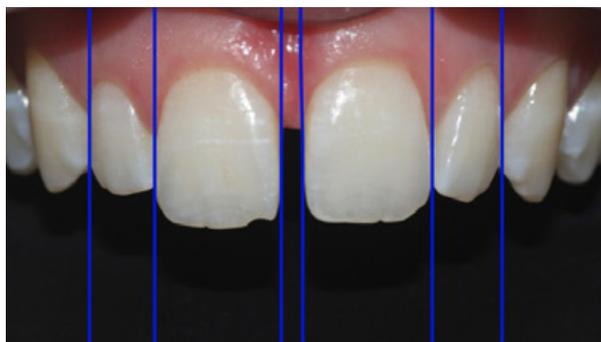


Figura 03 - Análise virtual da proporção dental dos incisivos que obedece a norma de estética (proporção áurea). Nesse caso, é inviável a oclusão pura e simples do diastema, sendo necessária a redistribuição do espaço e, a consequente redução do diastema entre os dentes 11 e 21.



Figura 04 - Anéis ortodônticos de borracha com 1,0 mm de espessura posicionado entre os dentes 12-13 e entre 22-23. Após 24 a 48 horas os dentes 11 e 21 migrarão em sentido mesial.



Figura 05 - Vista do espaço obtido entre 22 e 21.



Figura 06 - Vista do espaço obtido entre 12 e 11.

Fechamento de diastema com redistribuição de espaço utilizando Charisma® Diamond

Fotos do caso:



Figura 07 - Vista frontal do sorriso após a execução das restaurações. Convém salientar que o espaço obtido entre 12-11 e 21-22 após a remoção dos anéis de borracha é restaurado imediatamente com o acréscimo de resina na face mesial dos elementos 12 e 22 (Charisma® Diamond A1 e CL. Em outra sessão, executa-se o fechamento de diastema entre 11 e 21 agora reduzido pela mesialização proposital dos mesmos.



Figura 08 - Vista frontal da paciente em oclusão e com lábios e bochechas afastadas, após a conclusão do caso clínico.

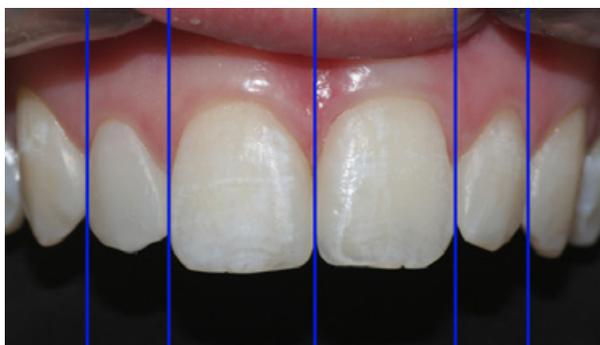


Figura 09 - Análise virtual da proporção dental dos incisivos que continua em concordância com a norma de estética (proporção áurea), mesmo após a execução das restaurações. Observe que apesar do aumento na largura dos incisivos superiores, prevalece a harmonizado sorriso.

