

cara® Print Cube

Lista de verificação antes da instalação

Os seguintes requisitos devem ser considerados antes de instalar a sua cara® Print Cube. Certifique-se de verificar todos os itens antes de instalar a impressora e antes de iniciar o seu primeiro trabalho de impressão.

Você encontrará mais informações sobre a impressora cara Print Cube, como as Instruções de Uso, no Centro de Suporte cara® Print da Kulzer: www.kulzer.com/mycube-support.

Caso tenha alguma dúvida sobre a configuração, entre em contato com o suporte local.



Verificação do CAD

Sistema 3Shape ☐

Instale o arquivo de material mais recente (.dme) da seção de downloads do site da Kulzer ou do cara® Print Support Hub.

Sistema **exocad** ☐

Instale o arquivo predefinido mais recente para a Kulzer, que está disponível na seção de downloads do site da exocad: <https://exocad.com/de/integration/3d-drucker-integration>.

Outro Sistema CAD ☐

O sistema CAD deve estar atualizado antes da impressão. Caso contrário, a impressão não poderá ser garantida. Entre em contato com o suporte local se precisar de mais assistência.

Verificação do CAM

sim não A ser definido

O PC atende aos requisitos mínimos?(*)

Mínimo: Windows 10/11 (64 bits), Intel Core i5/i7/i9 ou AMD Phenom II X4/X6 a 3,0 GHz ou superior com SSE2, 16 GB de RAM ou superior, 2 GB de espaço livre em disco ou superior, tela de 1920 x 1080 recomendada

☐ ☐ ☐

Conexão de rede no PC

☐ ☐ ☐

Verificação de material e acessórios

sim não

dima® Print Material disponível

☐ ☐

Pelo menos 9 litros de álcool isopropílico 99,9% disponíveis para pré e pós-limpeza com cara® Print CleanUp

☐ ☐



Verificação do ambiente de instalação	sim	não	A ser definido
Não exponha a impressora à luz solar direta. (Não exponha a impressora à luz solar direta para reduzir a exposição aos raios UV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
É utilizada iluminação LED (teto/parede etc.)? Isso pode levar a efeitos de polimerização indesejados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mesa/bancada de laboratório estável que suporte pelo menos 50 kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pelo menos 3 soquetes disponíveis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperatura ambiente (controlada) entre 18 °C e 30 °C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Para a instalação da cara® Print Cube, é necessário um local livre de poeira e vibração, com umidade relativa abaixo de 80%. Não instale a impressora próxima a fresadoras, equipamentos de jateamento ou equipamentos similares que produzam ou dispersem poeira.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Comentários:

