

dima Print materials

Limpeza e pós-cura

Produto	Indicação	Disponível na(s) Cor(es)	Limpeza em isopropanol (cara Print Clean)	Tempo de pós-cura (HiLite Power 3D)
 dima Print Mouthguard	Protetor bucal esportivo	Azul e branca	pré-limpeza: 3 minuto pós limpeza: 2 minuto	20 minutos (10 minutos frente + 10 minutos verso) em glicerina
 dima Print C&B temp	Coroas e pontes	A1, A2, A3, A3,5, B1, B2 e BL1		20 minutos (10 minutos frente + 10 minutos verso) em glicerina
 dima Print Denture Teeth	Impressão de dentes para prótese digital	A1, A2, A3, A3,5, B1, B2 e BL1		20 minutos (10 minutos frente + 10 minutos verso) em glicerina combinados dentes e base
 dima Print Stone gray	Modelos Odontológicos	Cinza		10 minutos (5 minutos frente + 5 minutos verso)
 dima Print Stone beige	Modelos Odontológicos	Bege		
 dima Print Stone teal	Modelos Odontológicos	Azul turquesa		
 dima Print Gingiva Mask	Gengiva artificial para modelos	Rosa		
 dima Print Ortho	Placas oclusais	Azul claro transparente		
 dima Print Cast ruby	Material calcinável para injeção e fundição	Vermelho		
 dima Print Guide	Guia cirúrgico	Laranja claro transparente		

dima Print materials

Limpeza e pós-cura

	Produto	Indicação	Disponível na(s) Cor(es)	Limpeza em álcool isopropílico (cara Print Clean)	Tempo de pós-cura (HiLite Power 3D)
	dima Print Splint clear	Placas oclusais	Transparente	pré-limpeza: 3 minutos pós limpeza: 2 minutos	6 minutos (3 minutos frente + 3 minutos verso)
	dima Print Denture Base	Impressão de base de prótese digital	Original Pink, Light Pink, Light Reddish Pink e Dark Pink		20 minutos (10 minutos frente + 10 minutos verso) em glicerina combinados dentes e base
	dima Print Denture Try-in	Impressão de mockups	Branca		20 minutos (10 minutos frente + 10 minutos verso) em glicerina combinados dentes e base

* Valores típicos

Kulzer Brasil

R. Cenno Sbrighi, 27 – Sala 42 -
São Paulo – SP – CEP 05036-010

© 2022 Kulzer Brasil. Todos os direitos reservados.

Saúde bucal nas melhores mãos



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP