



## Guia para a submissão de casos clínicos com as novas cores da Charisma E4sy

### Diretrizes de aplicação

- Utilize um **dique de borracha** (por exemplo, *Ivory® Rubber Dam*) durante o tratamento.
- Aplique o **adesivo GLUMA®** (por exemplo, GLUMA Bond Universal ou GLUMA 2Bond) e o **material restaurador Charisma** de acordo com as instruções de uso.
- **Fotopolimerize** o material com um aparelho fotopolimerizador adequado (por exemplo, *Kulzer Translux®*, 450–480 nm, 1550 – 600 mW/cm<sup>2</sup>).
- Finalize, contorne e pula a restauração (por exemplo, com *Charisma® EasyShine*).
- As quatro novas cores da **Charisma E4sy** foram projetadas para combinar com **os cores comuns da escala VITA®**:

SHADES	CORRESPONDING VITA® SHADES	CURING TIME	CURING DEPTH
LIGHT	A1, B1, B2, C1	20 s	2 mm
MEDIUM	A2, A3, B3, B4, C2, D2, D3	20 s	2 mm
DARK	A3.5, A4, C3, C4, D4	20 s	2 mm
BLEACH	BXL, BL	20 s	2 mm

### Indicações e contraindicações

- Mostre somente o uso dos materiais restauradores Charisma de acordo com as **indicações listadas nas instruções de uso**.
- **Não utilizar** em casos de alergias conhecidas/suspeitas a (met)acrilatos ou quando a dentina tiver uma espessura <1 mm da polpa.

### Requisitos para casos clínicos

- Concentre-se em **restaurações básicas e cotidianas**, sem caracterização individualizada. As quatro novas cores: LIGHT (CLARO)/ MEDIUM (MÉDIO)/ DARK (ESCURO)/ BLEACH (CLAREADO) permitem a aplicação de restaurações posteriores e anteriores em camadas **monocromáticas**.
- Documente **todo o fluxo de trabalho**: situação inicial, preparo, adesivo, inserção, acabamento e resultado final (idealmente após a reidratação). A situação clínica deve estar **limpa, seca e devidamente isolada** – de preferência com dique de borracha.
- Utilize **luvas higiênicas (saquinhos descartáveis)** para seringas em uso intraoral.
- **Imagens de acompanhamento** também são bem-vindas.



### Requisitos de fotografia

- Use uma **câmera DSLR** com lente macro e flash anelar/lateral. Não use câmeras de celular.
- Salve imagens em **RAW, TIF ou JPEG de alta qualidade**.
- Garanta **foco nítido**, enquadramento consistente e **composição simétrica**.
- Utilize **espelhos limpos, sem embaçamento** e retratores em boas condições.
- Obtenha **consentimento por escrito** para fotos reconhecíveis do paciente.

**Compartilhe sua experiência com as novas cores — cada feedback ajuda a nos aprimoramos.**

### Caso exemplar

[Charisma ONE case](#)